

お薬 DAY アラーム


取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

各部の名称とはたらき

※本書に記載されているイラストはイメージです。

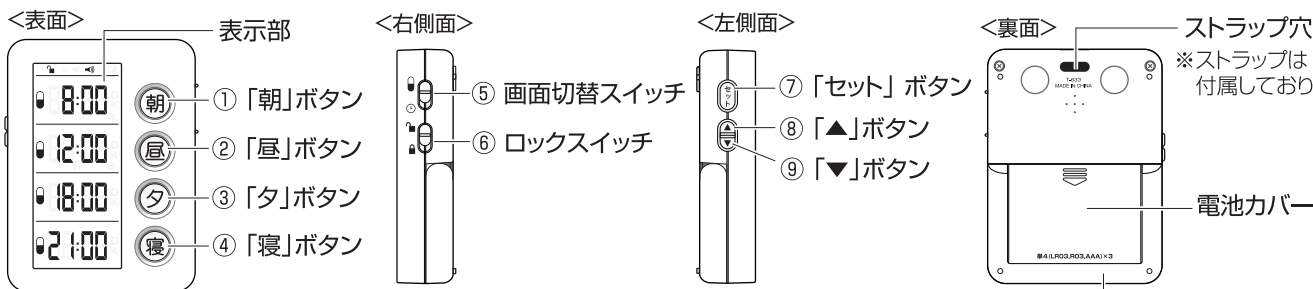

①～④「朝/昼/夕/寝」ボタン

長押し:それぞれの時間帯で、お薬アラームのセットを開始します。
※「寝」…寝る前
短押し:アラームを止めます。

⑤ 画面切替スイッチ

時計/カレンダー表示と、お薬アラーム表示を切り替えます。

⑥ ロックスイッチ

ボタン操作のロックと解除を切り替えます。

⑦「セット」ボタン

・お薬アラームや、時計/カレンダーの数字を決定するときに使います。
・時計/カレンダー表示の時長押しすると、日時セットモードになります。


⑧「▲」ボタン(音量・日時調整)

・日時調整のとき、1回押しと数字が1つ増えます。押し続けると早く進みます。
・アラーム音量が1段階大きくなります。

⑨「▼」ボタン(音量・日時調整)

・日時調整のとき、1回押しと数字が1つ減ります。押し続けると早く進みます。
・アラーム音量が1段階小さくなります。

スタンド(下図のように開きます)

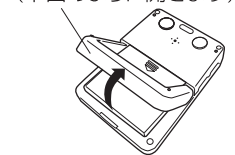

※本製品にマグネットは内蔵していません。

お薬アラームのセット方法

※お薬アラームをセットする前に、時計/カレンダーが正しくセットされているか確認してください。

(例)朝9時15分にお薬を飲むため、アラームをセットします。

1.画面切替スイッチを上スライドして「🕒」マークに合わせる。



お薬アラーム表示になります。
※初期設定は
朝8:00 昼12:00
夕18:00 寝21:00です。

2.「朝」ボタンを約3秒以上長押しする。



3.「▲」または「▼」ボタンで時を「9」に合わせ、「セット」ボタンを押す。



4.「▲」または「▼」ボタンで分を「15」に合わせ、「セット」ボタンを押す。




「昼」、「夕」、「寝」も同様の方法で、服薬のタイミングに合わせて任意のアラームをセットしてください。

お薬アラームをセットしないときは


お薬を飲まない時間帯がある場合は、アラームをオフにすることができます。

(例)1日3回しかお薬を飲まないため、「寝」のアラームはオフにします。

1.「寝」ボタンを約3秒以上長押しする。

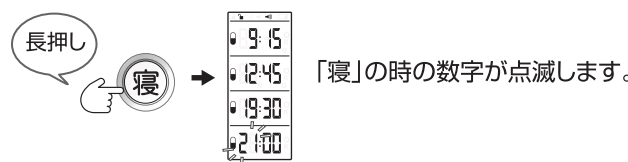

2.数字が点滅しているうちに「セット」ボタンを約3秒以上長押しする。

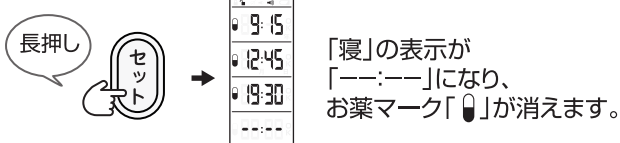

「寝」のアラームがオフになりました。

アラームの音量を選ぶ

アラームの音量は、大、小、無音から選べます。表示部の一番上に音量マークが表示されます。


時計/カレンダー表示またはお薬アラーム表示のときに「▲」を押すと1段階ずつ大きくなり、「▼」を押すと1段階ずつ小さくなります。



※無音にしてもLEDランプは約30秒間緑色に点滅します。
※時間帯ごとに音量を変えることはできません。
※アラーム鳴動中に音量を変えることはできません。


セットした時間になったら

1.セット時間になるとアラームが鳴りLEDランプが点滅する。

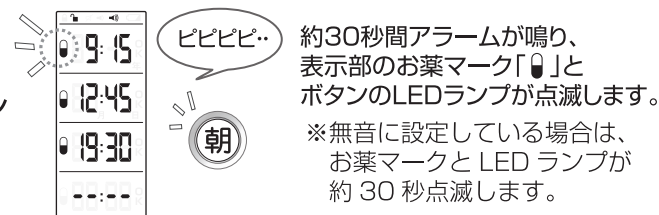

2.点滅しているボタンを押す。

※ロック状態でも、アラームを止めるボタン操作は可能です。

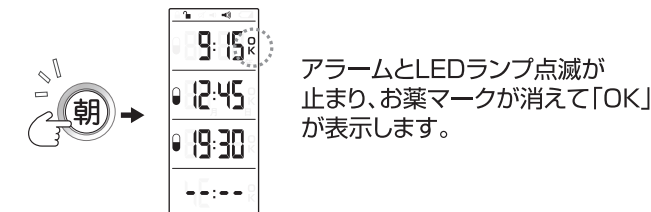

※ボタンを押して「OK」表示にしないと、お薬マークは日付が変わるまで点滅したままになります。


<スヌーズ機能>

ボタンを押してアラームを止めなかった場合、約5分後に再度約30秒間アラームが鳴りお薬マークとLEDランプが点滅します。

※スヌーズ機能が動くのは1回のみです。
※無音に設定している場合のスヌーズ機能は、約30秒間のLEDランプ点滅のみです。

画面自動切り替え機能

時計/カレンダー表示にしている場合でも、お薬アラームのセット時間になると自動的にアラーム表示に切り替わります。

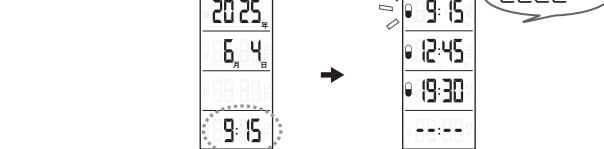


ボタンを押してアラームを止めると、約2秒後に時計/カレンダー表示に戻ります。(止めなかった場合もアラーム鳴動終了後に時計/カレンダー表示に戻ります。)

時計/カレンダーのセット方法


※初めて電池をセットしたときや、電池を交換したあとで「2024」が点滅している状態の場合は、下記「3」から行ってください。

1.画面切替スイッチを下にスライドして「🕒」マークに合わせる。

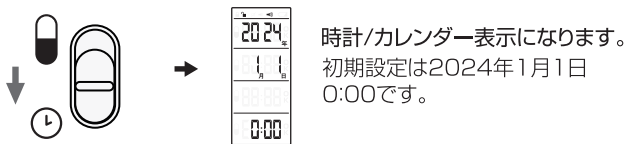


時計/カレンダー表示になります。
初期設定は2024年1月1日0:00です。

2.「セット」ボタンを約3秒以上長押しする。

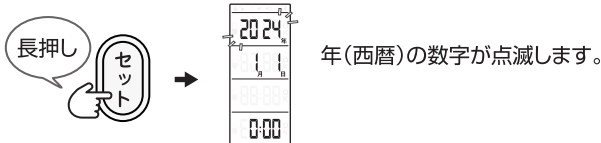


年(西暦)の数字が点滅します。

3.「▲」または「▼」ボタンで年を合わせ、「セット」ボタンを押す。

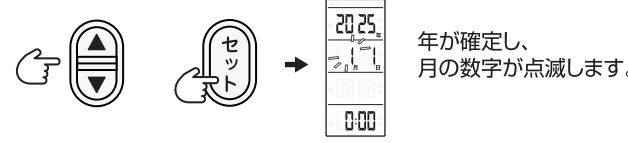


年が確定し、月の数字が点滅します。

4.「▲」または「▼」ボタンで月を合わせ、「セット」ボタンを押す。

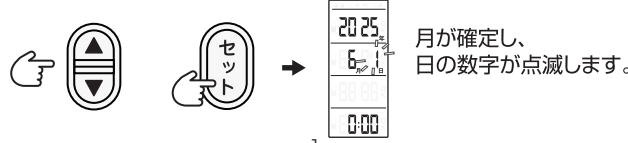


月が確定し、日の数字が点滅します。

5.「▲」または「▼」ボタンで日を合わせ、「セット」ボタンを押す。

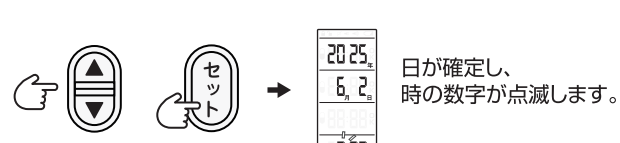

日が確定し、時の数字が点滅します。


6.「▲」または「▼」ボタンで時を合わせ、「セット」ボタンを押す。

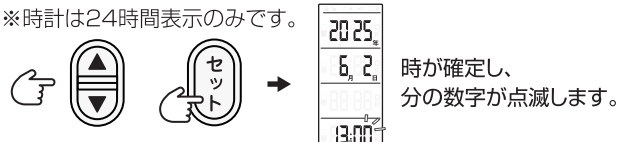

※時計は24時間表示のみです。

時が確定し、分の数字が点滅します。

7.「▲」または「▼」ボタンで分を合わせ、「セット」ボタンを押す。

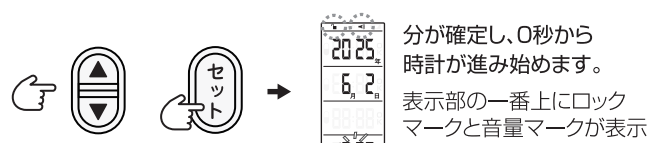


分が確定し、0秒から時計が進み始めます。
表示部の一番上にロックマークと音量マークが表示され時計の「:」が点滅します。

※「セット」ボタンを押した時点から0秒として時計が進み始めます。

ロック機能（誤操作防止）

ロック状態にしておくとお薬アラームのセットや音量切替などの操作ができなくなります。
※アラームを止めるボタン操作は可能です。

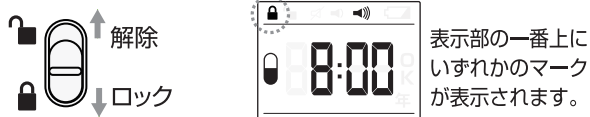


リピート機能

お薬アラームは、毎日夜中の0時になって日付が変わると自動的に再セットされます。
(毎日同じ時間にアラームが鳴ります。)




電池交換

※使用電池：単4形乾電池×3個

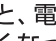電池容量が消耗してくると、電池マーク「」が表示されます。また、表示が薄くなったり、誤作動などが発生する場合があります。以下の手順で電池交換をしてください。
※付属の電池は動作確認用電池ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。


1. 電池カバーを取りはずす。

スタンドを開き、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。

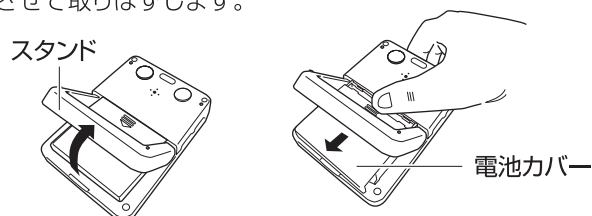


2. 古い電池を取り出し、新しい電池を入れる。

※電池の極性(+)・(-)を間違えないように入れてください。

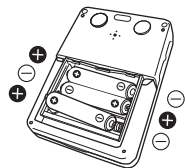

3. 電池カバーを閉じる。

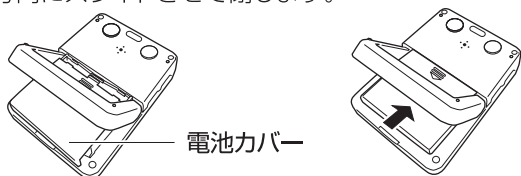



スタンドを開いた状態で電池カバーをセットし、矢印の方向にスライドさせて閉じます。





※電池を交換した場合は、時計 / カレンダーおよびセットしたお薬アラームはすべてリセットされて初期設定になりますので、再度セットしなおしてください。

安全上のご注意

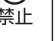ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する内容です。必ずお守りください。

| | | | |
|--|--|--|---------------|
|  禁止 | してはいけない内容 |  指示 | 実行しなければならない内容 |
| 警告 | | | |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置いたりしない。誤飲・けがの可能性があり。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。 | | |
|  指示 | <ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの可能性があり。 | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 注意 | | | |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防塵構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。 ●湿気や磁気が多い場所に置かない。故障の原因になります。 ●ストーブの近くや高温になる場所、直射日光の当たるところに放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。 | | |
|  指示 | <ul style="list-style-type: none"> ●吊り下げて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを開き水平で安定した場所に設置する。故障の原因になります。 | | |


| | | | |
|--|--|--|--|
| 電池について | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ●ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。 ●電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。 ●電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。 ●電池の極性(+)・(-)を正しく入れる。 ●電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。 ●電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。 ●新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。 ●種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。 ●使用・保管時に、電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。 | | | |

お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

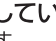- 電源が入らない
 - ・電池の向き(極性+)・(-)を確認してください。
 - ・3個とも新しい電池に交換してください。
- 音が鳴らない、音が大きい、音が小さい、音を消したい
 - ・時計 / カレンダー表示またはお薬アラーム表示のときに「▲」「▼」ボタンを押して音量を切り替えてください。※ロック解除の状態で行ってください。
- セット時間になってもアラームが鳴らない(LEDランプも点滅しない)
 - ・時計が正しくセットされているか確認してください。
- お薬マークが点滅し続けている
 - ・点滅している時間帯のボタンを押してください。お薬マークが消えOKが表示します。
- 電池マーク「」が表示している
 - ・電池残量が不足しています。3個とも新しい電池に交換してください。
- ボタン操作ができない
 - ・ロックスイッチがロック状態になっていませんか？
- 時計やアラームのセット途中で数字が動かせなくなった
 - ・セット中に約1分何も操作がないと、表示している数字が自動的に決定されます。最初からやり直してください。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので「保証規定」をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼される時

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談センター」までお問い合わせください。

お客様相談センター

☎0120-875-019

受付時間：月～金 9:00～12:00
13:00～17:00

祝祭日および当社指定休日を除く

URL：https://www.dretec.co.jp

お客様サポート



仕様

| | | | |
|---------------------|---|------|--------|
| 品番 / 品名 | T-633 服薬管理アイテム「お薬 DAY アラーム」 | | |
| 寸法 | 約幅71×奥行24×高さ91mm | | |
| 質量 | 約115g(電池含む) | | |
| アラーム鳴動 / LEDランプ点滅時間 | 約30秒間 (スヌーズ機能 5分後1回) | | |
| 音量切替 | 大・小・無音 | 時計精度 | 月差±30秒 |
| 動作温度範囲 | 0～40℃ | | |
| 使用電池 | 単4形乾電池×3個 | | |
| 電池寿命 | 約1年間 (アルカリ乾電池使用、1回30秒 1日4回アラームを鳴らした場合) | | |
| 材質 | 本体：ABS樹脂 ボタン：アクリル | | |

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

《保証規定》

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震などの外的要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

《保証書》

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

| | | | |
|--------|------------|-----|----------|
| 品番 | T-633 | | |
| 保証期間 | お買い上げ日より | 1年間 | ※本体 持込修理 |
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所 お電話 | | |
| 販売店* | 販売店名 | | |
| | ご住所 お電話 | | |

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。